

さあ測ってみよう



①②③の簡単操作

- ①③ スイッチング (電源入れ/疲労度)
- ② 電源ON
- 電源し(ボタン)
- 測定(ボタン)



操作手順

表側	接眼部	裏側	測定モード	ゲームモード
			<p>少し離して 両眼で 見てください。</p>	<p>380 → 4-6</p> <p>電源入れ/疲労度 を2回目に3秒以上 押すと、ゲームモード になります。</p>
<p>250</p> <p>400</p>			<p>① 人差し指で 電源入れ/疲労度 を 1回押します。</p> <p>指を離します。</p> <p> ちらちらします。</p>	<p>888</p> <p>ゲーム開始</p> <p> を 押すたびに 1行ずつ決 まります。</p> <p>※3行そろそろようにチャレンジ※</p>
<p>400</p> <p>250</p>			<p>② を の、ちらちらが なくなるところまで 押し続けます。</p> <p> の、ちらちらがなくな れば親指を離します。</p>	<p>888 → 250</p> <p>元に戻すには3行 数字を確定して 電源入れ/疲労度 を3秒以上押します。</p>
<p>380</p>			<p>③ もう1度人差し指で 電源入れ/疲労度 を 押します。押している間 数字がです。</p> <p><small>この数値が現在の今の疲労度です。 「年代別色別ゾーン」を見てみましょう。</small></p>	<p>400</p>

※連続して測定をしたい時は、ちらちら出し を押し、 のちらちらを出し②～③の手順で操作してください。

※なにもしないのでそのままにしておくと、30秒後に電源が切れます。



●新製品
技術で拓く真心のクオリティー
ヒロボー株式会社
広島県府中市本山町530-214 〒726-8614
TEL:(0847)41-6780(代) FAX:41-8902

●お問い合わせ先

HIROBO

脳の疲れ メピカで測れば 手軽にチェック できます。




脳の疲れ測定器

眼精疲労、及び大脳皮質の情報処理能力を測ります。

健康管理にメピカを!!

★お求めは薬局・薬店
ドラッグストアで

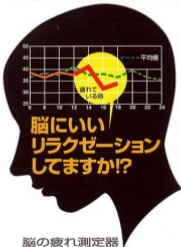


脳にいい リラクゼーション してますか!?

疲れが数字で解る カンタン測定20秒

疲れを感じないが自分の平均値から大きく数値が低下し、過労が限界に達しているとしたら? ...これが過労が分からないと言われている現象なのです。

測定値しかた (GD)

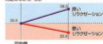

- 良い例 / リラックス効果があった時
- 悪い例 / リラックスしていない時

脳の疲れ測定器

DIGITAL FLICKER HE-100

M.E.P.I.C.A

“疲れをはかってからリフレッシュ”

1. メピカで疲れを測る


2. 測定値から自分のゾーンをみる

メピカで測る数値（フリッカー値）について

フリッカー値は休養充分の時、視覚情報処理能力が高まる為
数値が高くなり、ハードワークで疲れてくると
注意の集中ができない為、数値が低くなります。


年代別色別ゾーン一覧

脳の疲れにご注意!!

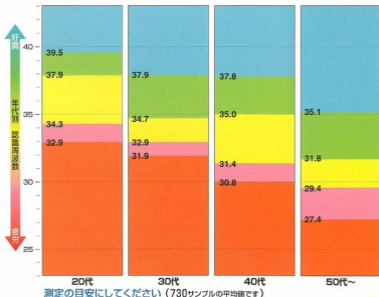

脳の疲れにご注意!!

脳の疲れ測定器
DIGITAL FLICKER HE-100
M.E.P.I.C.A

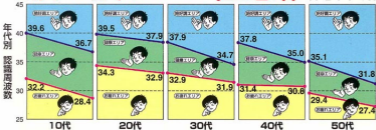

測定を目安にして下さい (730サンプルの平均値です)

MAX MIN

HIROBO

新・発想
創造商品

健康が目に見える。
数値でわかるお疲れ度。

疲労度(脳) 測定器誕生!

コンパクトで操作も簡単に
測定することができます。

●こんな方に…

OA機器を
操作する人



疲れが
たまりやすい
中高年に



メピカの店頭展開例

- レジの横に…
- 陳列台に…



お客様への
サービスとして
ご活用ください。

DIGITAL FLICKER HE-100

M·E·P·I·C·A

HIROBO

メピカ



メピカは、疲労度(脳)を測るヘルステクニックです。
ストレスに置かれた現代人にとって、
健康は人生の大敵な要素です。
健康に関する欲求が高まる中、
自分のコンディションを知りたい人は多いはず。
メピカは、チームを誇りにして生まれた、
新しいニーズに応える商品です。

薬局・薬店様専用

薬局・薬店様にとってのメリットは

- メピカは、疲労度(脳)が数値で表せます。
- 今までにないサービスとして他店との差別化がはかれ、
特長ある店舗に役立ちます。
- 売れ商品の売上向上、利益に貢献します。

メピカの活用例

メピカとの相乗効果で
売り上げ増が
期待される商品

- 疲労度が高い人には、ビタミン剤・ドリンク剤・健康食品等、
回復効果などについては効果を測めます。



- 疲労度の高い方には、種類によって数値が
変わることを、そして自分の疲労度(脳)のク
ラークを知ることが大切という説明をします。



HIROBO 健康で豊かに暮らすためのテクノロジー
ヒロボ株式会社
CORPORATION HIROBO, INC. 1975-2014
TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1100

①②③のカンタン操作 さあ! 測ってみましょう!



操作手順



① **ON/DISPLAY** を一回押して
のぞいて見ましょう。

※この形の**画面**がアラアラとします。

② ちらつきがなくなるところ
まで**UP**を押し続けましょう。
ちらつきがなくなったら指を
離します。

※**UP**を押し続けることちらつきが
でてきます。

③ もう一度 **ON/DISPLAY** を
押すと数字が表示されます。
ここで出た数字があなたの
衰れを表わします。
(年代別認識測定数)で
調べてみましょう!

250

アラアラ

—

380

● **ON/DISPLAY** を2回目以後、
3秒以上押すとゲームモードに
なります。

● **UP/DN** を押すた
びに1桁ずつ決
まります。
3桁全て同じ数字が
そろるように挑戦してみてください。
敗れた時にゲームをして気分転換しましょう。

● 元に戻すには
3桁数字を確認
してから
ON/DISPLAY を
3秒以上押して
ください。

● 何もしないでそのまま
にしておくと、30秒後に電源が切れます。

メインスイッチ (ON/DISPLAY)


①③

電池BOX

②

DN (ダウンボタン)

UP (アップボタン)

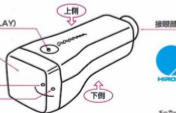

接眼部



製造販売元
技術で最先端のクオリティー
ヒロボ株式会社
広島県廿日市市北見2-14-1700-0014
TEL: 0847-41-6700 FAX: 41-6902

メヒカ専用ダイヤル
0847-41-9833

メーカー希望小売価格 ¥14,800 (税別)

M·E·P·I·C·A

眼精疲労

肉體疲労

精神疲労

メピカは、疲労度(脳)を測るヘルスケア商品です。
 ストレスに囲まれた現代人にとって、
 健康は人生の大切な要素です。
 健康に関する意識も高まる中、
 自分のコンディションを知りたい人は多いはず。
 メピカは、ブームを先取りして生まれた、
 新しいニーズにあえる商品です。

貴方の**脳**の**疲労度**を測ります。



元気な脳は
素晴らしい知恵と
アイデアを生む
原動力

おもいっきりテレビ

(日本テレビ)でも紹介されました。

● 疲れた現代人にピッタリ!

OA機器を
操作する人



疲れが
たまりやすい
中高年に

